

GUANTE DE VINILO TRANSPARENTE EXAMEN - LIBRE DE TALCO ALFASAFE®


NOMBRE GENERICO	Guante vinilo para examen transparente Guante de vinilo sin polvo. Guante siliconado.
NOMBRE COMERCIAL	Guante Vinilo Transparente Alfafafe Guante Silicona Alfafafe
MARCA	ALFASAFE®
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2018DM-0017506
VIGENCIA DEL REGISTRO	29 de Enero de 2028
TIPO DE RIESGO	Clase IIA - Riesgo Moderado
VIDA ÚTIL	5 años

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> •Guante vinilo no estéril libre de talco. •Guantes ambidiestros. •Textura lisa, transparente suave y ligero •No producen fatiga elástica •Reduce el riesgo de hipersensibilidad y alergias relacionadas con el uso de látex natural y talco. •El puño reforzado minimiza el deslizamiento, mejora la resistencia y facilita el revestimiento del guante. •Están fabricados con una delgada capa de vinilo que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> •Resistentes a la elongación. •Excelente resistencia a la punción y a la rotura •Material sintético libre de la proteína del látex. •Característico por su impermeabilidad, estabilidad y duración. •Compuestos por 100% resina de cloruro de polivinilo, derivado del proceso de desinfección del plástico de cloruro de polivinilo e inmersión.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> •Humedad Relativa: MÁXIMA 70% •Temperatura: MÁXIMA 30C° •Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. •Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.



FICHA TÉCNICA

FT-DT 005

Versión: 16

21-01-2019

ESTÁNDARES NORMATIVOS	Los guantes de Vinilo para examen cumplen con la norma EN455-1, EN455-2, EN455-3 estándar.
USOS	<ul style="list-style-type: none">• Los guantes de vinilo ALFASAFE® puede ser utilizado en procedimientos clínicos.• Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto.• Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que no presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal.• Abrir el dispensador por la línea punteada.• Tomar el guante que sobresale, halando de él hacia arriba y luego lateralmente.• Ponerse el guante en la mano dominante, ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano.• Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.• Ajustar los guantes entrelazando las manos.• Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivo para un solo uso.• Antes de su uso retirar de las manos cualquier objeto que pueda ocasionar rotura.• No aplicar algún tipo de sustancia antes de colocar el guante.• Una vez abierta la unidad utilizarlos en el menor tiempo posible.
DISPOSICIÓN FINAL	<ul style="list-style-type: none">• Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.• En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espesor (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)	
S	≥ 245	88 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	5.8 ± 2
M	≥ 245	98 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	6.1 ± 2
L	≥ 245	105 ± 5	0.13 ± 2	0.14 ± 2	0.11 ± 2	6.8 ± 2



FICHA TÉCNICA

FT-DT 005

Versión: 16

21-01-2019

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL	UNIDAD DE EMBALAJE (Unidad mínima de despacho)
GUVT001	GUANTE VINILO TRANS ALFASAFE (S) X 100 UND (SIN TALCO)	CAJA X 100 UND.	CARTÓN X 10 CAJAS
GUVT002	GUANTE VINILO TRANS ALFASAFE (M) X 100 UND (SIN TALCO)	CAJA X 100 UND.	CARTON X 10 CAJAS
GUVT003	GUANTE VINILO TRANS ALFASAFE (L) X 100 UND (SIN TALCO)	CAJA X 100 UND.	CARTON X 10 CAJAS
GUVT004	GUANTE VINILO (SILICON) ALFASAFE (S) X 2 PARES	BOLSA X 2 PARES	CARTON X 450 BOLSAS
GUVT005	GUANTE VINILO (SILICON) ALFASAFE (M) X 2 PARES	BOLSA X 2 PARES	CARTON X 450 BOLSAS
GUVT006	GUANTE VINILO (SILICON) ALFASAFE (L) X 2 PARES	BOLSA X 2 PARES	CARTON X 450 BOLSAS
GUVT018	GUANTE VINILO EXAMEN TRANS. SIN MARCA (M) X 24 UNIDADES	BOLSA X 12 PARES	CARTÓN X 88 BOLSAS
GUVT023	GUANTE VINILO ALFASAFE TALLA S X 24 UNIDADES	BOLSA X 12 PARES	CARTON X 88 BOLSAS
GUVT024	GUANTE VINILO ALFASAFE TALLA M X 24 UNIDADES	BOLSA X 12 PARES	CARTON X 88 BOLSAS
GUVT025	GUANTE VINILO ALFASAFE TALLA M X 24 UNIDADES	BOLSA X 12 PARES	CARTON X 88 BOLSAS