

GUANTE LÁTEX LISO



PESO:

	TALLA XS	TALLA S	TALLA M	TALLA L
PESO GR	4,8 +/-0,3	5,1 +/-0,3	5,4 +/-0,3	5,8 +/-0,3

GROSOR:

	PARED INDIVIDUAL GUANTE(MM)
DEDOS	Min 0,10
PALMA	Min 0,09
PUÑO	Min 0,08

PROPIEDADES FÍSICAS:

	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO	DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO
ELONGACIÓN EN EL QUIEBRE %	Min 650	Min 500

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Los guantes son productos sanitarios de un solo uso, utilizados como barrera bidireccional entre el personal que lo utiliza y el entorno a través del cual está en contacto con sus manos.

CARACTERÍSTICAS

Tipo: guante de examen de látex, levemente empolvados, no estériles.

Material: Látex de caucho de alto grado natural.

Exterior del guante: liso.

Interior del guante: cloratado, empolvado de fécula de maíz.

Color: natural a blanco permitiendo cambiar de acuerdo a la variación del grosor.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

Ambidiestro, suave, puño bordeado. es un producto Hipoalergénico.

AQL: 1,5.

Contenido de proteína: Max 200 ug / dm²

Nivel de polvo: 10mg / dm² (100mg guante)

Contenido de humedad: 0.8% x guante pte

Cambio de guante: cada 45 - 60 minutos.

Estilo de empaque: 100 piezas de guantes x 10 dispensadores x 1 caja.

Condiciones de bodega: Humedad relativa máxima 70%, temperatura max 30c°.

Vida del producto: duración de 5 años desde la fecha de fabricación con las condiciones de bodegaje mencionadas.

Distribuido por:

allers
Group

Representaciones - Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

allmed

GUANTE LÁTEX LISO

INDICACIONES

Proporciona una barrera de bioseguridad de las manos del profesional en procedimientos o desarrollo de actividades.

RECOMENDACIONES DE USO

Un solo uso.

- Lavarse las manos antes de su uso.
- Después de su uso retirar de las manos el polvo con agua.
- Se requiere en centros hospitalarios, odontológicos, veterinarios, de estética y belleza.

PRECAUCIONES

Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

REGISTRO INVIMA 2014DM-0003208-R1



Distribuido por:

allers
Group

Representaciones - Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

allmed