

**GUANTE NITRIL PARA EXAMEN – NO ESTÉRIL ALFASAFE®**



<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	Guante Nitrilo para examen no estéril Guantes de examen de Nitrilo
<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	Guante de Nitrilo
<b>MARCA</b>	ALFASAFE®
<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	DISPOSITIVO MÉDICO
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2017DM-0016700
<b>VIGENCIA DEL REGISTRO</b>	23 de Agosto de 2027
<b>TIPO DE RIESGO</b>	Clase IIA - Riesgo Moderado
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Guantes ambidiestros.</li> <li>•Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al látex.</li> <li>•Puño con reborde que minimiza el deslizamiento y genera protección extra.</li> <li>•Las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo.</li> <li>•Están fabricados con una delgada capa de nitrilo que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza.</li> <li>•Estos guantes ofrecen protección y resistencia a una amplia gama de disolventes y productos químicos peligrosos.</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Resistentes a la elongación.</li> <li>•Excelente resistencia a la punción y a la rotura</li> <li>•Material sintético libre de la proteína del látex.</li> <li>•Característico por su impermeabilidad y estabilidad a gases y agua.</li> <li>•Compuestos por copolímeros de butadieno y acrilnitrilo (Nitrato de Butadieno).</li> </ul>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Humedad Relativa: MÁXIMA 70%</li> <li>•Temperatura: MÁXIMA 32C°</li> <li>•Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol.</li> <li>•Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.</li> </ul>
<b>ESTÁNDARES NORMATIVOS</b>	Los guantes de Nitrilo examen cumplen con los requisitos establecidos por la norma <b>ASTM D 6319: 2000</b> (a) Especificación estándar para nitrilo, Guantes de examen de uso médico y <b>BS EN 455-1 y 2: 2000</b> Medical Guantes para el uso individual.

<p><b>USOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los guantes de nitrilo <b>ALFASAFE</b>® puede ser utilizado en procedimientos clínicos.</li> <li>• Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto.</li> <li>• Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que no presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal.</li> <li>• Abrir el dispensador por la línea punteada.</li> <li>• Tomar el guante que sobresale, halando de él hacia arriba y luego lateralmente.</li> <li>• Ponerse el guante en la mano dominante, ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano.</li> <li>• Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.</li> <li>• Ajustar los guantes entrelazando las manos.</li> <li>• Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.</li> </ul>
<p><b>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo para un solo uso.</li> <li>• Antes de su uso retirar de las manos cualquier objeto que pueda ocasionar rotura.</li> <li>• No aplicar algún tipo de sustancia antes de colocar el guante.</li> <li>• Una vez abierta la unidad utilizarlos en el menor tiempo posible.</li> </ul> <p><i>"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."</i></p>
<p><b>DISPOSICIÓN FINAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.</li> <li>• En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"</li> </ul>

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

GUANTE NITRILO AZUL, NEGRO Y CREMA						
Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espeso (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)	
<b>S</b>	MIN 245	88 ± 3				4.7 ± 2
<b>M</b>	MIN 245	98 ± 3	0.16 ± 2	0.12 ± 2	0.8 2	5.0 ± 2
<b>L</b>	MIN 245	108 ± 3	0.16 ± 2	0.12 ± 2	0.8 2	5.6 ± 2
<b>XL</b>	MIN 245	112 ± 3	0.16 ± 2	0.12 ± 2	0.8 2	6.0 ± 2
GUANTE NITRILO LIVIANO O THIN						
Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espeso (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)	
<b>S</b>	MIN 240	83 ± 2	0.14 ± 2	0.8 ± 2	0.5 ± 2	3,4 ± 2
<b>M</b>	MIN 240	98 ± 3	0.14 ± 2	0.8 ± 2	0.5 ± 2	3,5 ± 2
<b>L</b>	MIN 245	108 ± 3	0.14 ± 2	0.8 ± 2	0.5 ± 2	3,7 ± 2

### PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL	UNIDAD DE EMBALAJE (Unidad mínima de despacho )
GUNA001	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (S)	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA002	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (M)	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA003	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (L)	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA013	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (XL)	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA009	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE ( S )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA010	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE ( M )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA011	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE ( L )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA013	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE ( XL )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA014	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE ( XS )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNB002	GUANTE NITRILO BEIGE ALFA SAFE ( M )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNB003	GUANTE NITRILO BEIGE ALFA SAFE ( L )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNB004	GUANTE NITRILO BEIGE ALFA SAFE ( XS )	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNN002	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (M)	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNN003	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (L)	Caja x 100 UND	Cartón x 10 cajas x 100 Unidades
GUNA004	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (S)X PAR	Bolsa x 12 Pares	Cartón x 40 bolsas x 12 pares.
GUNA005	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (M)X PAR	Bolsa x 12 Pares	Cartón x 40 bolsas x 12 pares.
GUNA006	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (L)X PAR	Bolsa x 12 Pares	Cartón x 40 bolsas x 12 pares.
GUNN005	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE ( M ) x PAR	Bolsa x 12 Pares	Cartón x 40 bolsas x 12 pares.
GUNN006	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE ( L ) x PAR	Bolsa x 12 Pares	Cartón x 40 bolsas x 12 pares.